

RIBBOND MEREVÍTŐROST RENDSZER



Mire való? Általános jellemzők.

A merevítőszalagok kompozíciós tömőanyagokkal és híd készítésére szolgáló kompozitokkal együtt alkalmazva azokat ellenállóbbá teszik.

Ultra magas molekulásúlyú polietilén rostból (UHMWPE) egy szabadalmaztatott eljárással (keresztcsomózású zártöltés) szövött szalagcsalád, melyet hideg gázplazma kezeléssel tesznek alkalmassá, hogy összekössön a bondokkal és akrilátokkal.


Típusai - azok jellemzői és alkalmazása

Classic: A Classic család 0,35 mm vékony, különböző szélességű szalagokból áll.
Szélesség választék: 2mm, 3mm, 4mm, 7mm, 9mm

THM: (Thinner and Higher Modulus of elasticity, azaz vékonyabb, de nagyobb elaszticitási modulusa van) Ez a család fele olyan vékony mint a Classic (0,18mm) de ugyanolyan erős.
Szélesség választék: 1mm (ez az Orthodontic), 2mm, 3mm, 4mm

ULTRA: A THM továbbfejlesztett változata, mindössze 0,12 mm vastag.
Szélesség választék: 1mm (ez az Orthodontic), 2mm, 3mm, 4mm

Triaxial: Két fajta található a Triaxial családban: a THIN (vékony) és a DENSE (sűrű).
Ez a szalagcsalád sokkal vastagabb, mint a többi. Nagy terhelésnek kitett rágófogtáji hidak belső merevítésére szolgál.

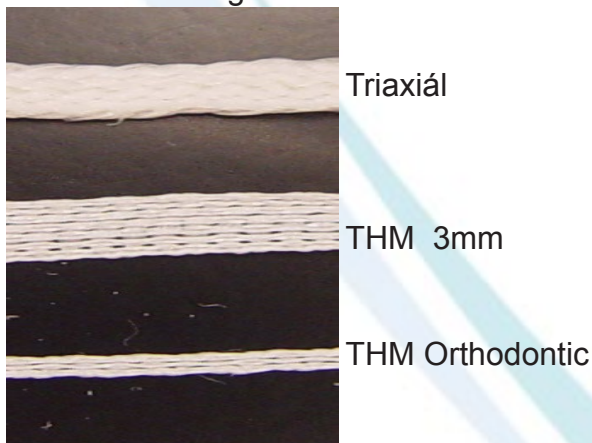

Jellemző javallatok:

- fogszabályozás után a visszarendeződés elkerülésére merevítőként a fogakra ragasztva
- meglazult fogak merevítő sínezésére
- direkt hidak belső merevítése
- indirekt hidak belső merevítése
- direkt inlay hidak belső merevítése
- indirekt inlay hidak belső merevítése
- nagyon kevés foganyag esetén a nagyméretű tömések belső ún. intrakoronális merevítése
- akár kihúzott fogakat is visszaerősíthetünk ezzel az eljárással
- foghúzás után azonnali ideiglenes fogmű készítése

Kiszerezés, utánrendelés:

- Egy darabos kiszerezésben árusítjuk: 22 cm hosszú szalag
- Classic kit: 3x22 cm szalag (2mm, 3mm 4mm), haszn. ut., olló, ónfólia
- THM kit: 3x22 cm szalag (2mm, 3mm 4mm), haszn. ut., olló, ónfólia
- ULTRA kit: 3x22 cm szalag (2mm, 3mm 4mm), haszn. ut., olló, ónfólia
- Triaxial kit: 2 thin és 2 dense szalag

Dr. Volom Dental & Medical Kft. * H-1055 Budapest, Nyugati tér 9. I/3.

tel.: +36 1 311 65 84 * fax.: +36 1 489 37 09 * mail: shop@drvolomdental.hu * web: www.drvolomdental.hu

Rövid használati utasítás a Ribbond merevítőrost szalagokhoz

A szalag előkészítése:

- a szalagot műszerrel (pl.: csipesz) vegye ki a tasakból
- vágja le a kellő hosszúságú szalagot - a készletben található ónfólia, vagy egy alumínium fólia csík felpróbálása a fogakra segít a hossz lemérésében
- mindig zárja vissza egy gemkapocs segítségével a szalag tasakját
- itassa át bonddal a kívánt hosszúságú szalagot: a Cosmedent Complete töltetlen rezin (kék üveg) ideálisan alkalmazható erre a célra.
- a bond **NEM LEHET ÖNSAVAZÓ**, csak hagyományos!
- a felesleges bondot fújja vagy itassa le
- itassa át a szalagot folyékony kompozittal - a legjobb eredményt a különlegesen erős Renamel Microhybrid Flow-tól vagy az Insure-től remélheti

A fogak előkészítése:

A fogakat az adhézios beragasztás szabályai szerint kell előkészíteni.

- savazza, majd bondozza a fogfelszíneket a bond és tömőanyag gyártójának utasításai szerint. **MOST MÉG NE VILÁGÍTSA MEG!**
- helyezzen tömőanyagot (NEM flow-t) a megerősíteni kívánt fogakra, és ebbe nyomja bele a szalagot.
- adaptálja a szalagot szorosan a fogfelszínre és a fogközökbe.
- célszerű foganként polimerizálni a tömőanyagba fektetett szalagot. A polimerizálni nem kívánt részeket ideiglenesen alumínium fóliával védheti a fénytől.
- a szalag-tömőanyag kompozíciót polimerizálja a szokásos fénnel és a tömőanyag gyártójának leírása szerinti időtartamokkal.
- végleges sínezéshez két rétegben helyezzen el a fogakon szalagot. A második réteg nem megy be a fogközökbe
- borítsa a szalag felszínét rendes vagy folyékony tömőanyaggal, mivel a Ribbond nem polírozható
- gyémánttal távolítsa el a felesleges kompozitot, majd polírozza
- az esetlegesen exponálódott Ribbond szálakat ismét borítsa nomál kompozittal, mivel a szalag nem polírozható

