


A PROPHY EZ JET

FOGÁSZATI POLÍROZÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA ÉS KLINIKAI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

magyar változat - verziószám: 1.2

A készülék részei

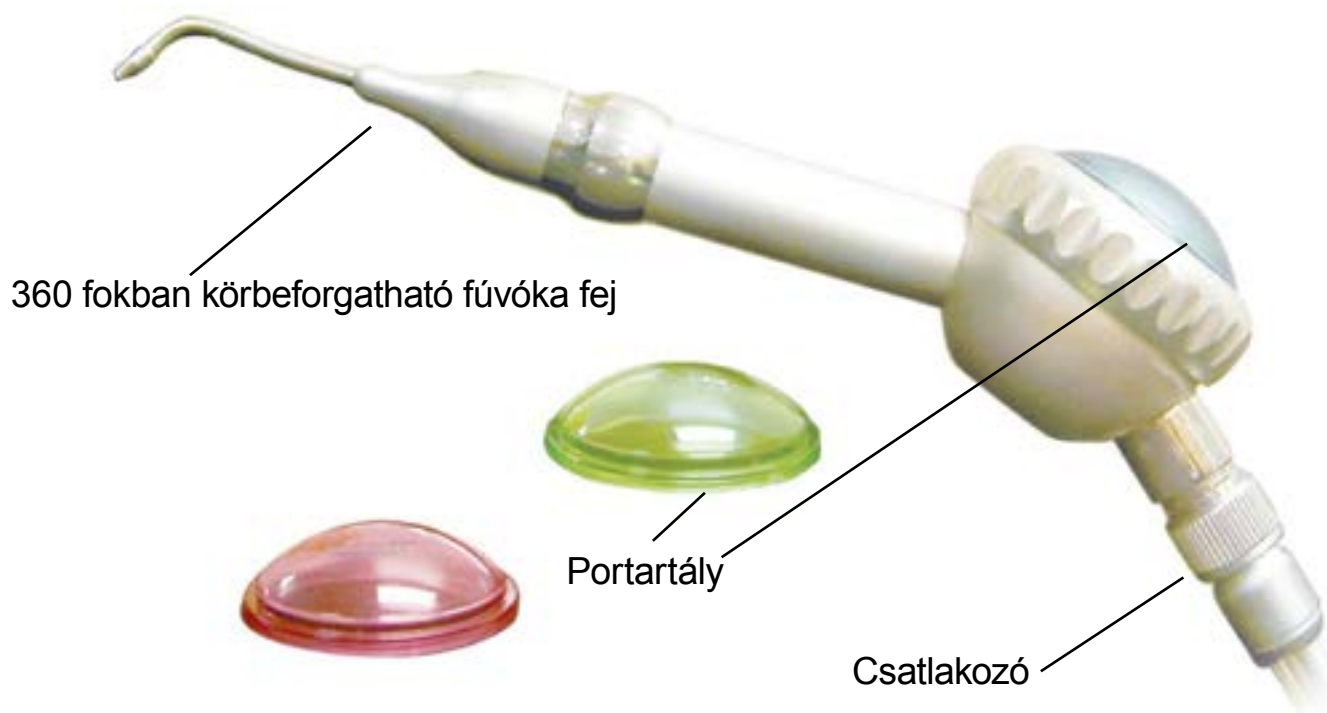

FIGYELMEZTETÉS!

- 1/ Csak fogorvos és klinikai szájhygiénikus használhatja a készüléket!
- 2/ Ne használja a következő pácienseknél:
 - azoknál, akiknél a nátriumbevitelt korlátozni kell
 - súlyos emésztőszervi fekély esetén
 - májdiszfunkció esetén
 - tüdő- vagy kardiális diszfunkció esetén
 - hyperemia, hemorrágia vagy a szájüreg gyulladással járó megbetegedése esetén
 - szájüregi sérülés vagy abnormitás esetén
 - azoknál, akik hajlamosak a szájnyálkahártya gyulladásra
 - allergia esetén
 - kontaktlencse viselése esetén
- 3/ Ne használja az eszközt, ha a portartály teteje repedt vagy mély karkok vannak rajta, mert az eltörhet, s a benne lévő anyag szétrepülhet.
- 4/ Ne tegye ki ütésnek a portartály tetejét!
- 5/ Kerülje el, hogy a portartály teteje szerves oldószerrel érintkezzen, mert az eltörhet.
- 6/ A portartály fogyó eszköz. Az UV fény és más környezeti faktorok igénybe veszik. Cserélje a portartály tetejét 6 havonta!
- 7/ Hetente egyszer vegye le a tetőt és a gumitömítést, és tisztítsa meg a hozzátapadt anyagoktól! Ilyenkor ellenőrizze azt is, hogy van-e sérülés a fedélen!

ÜGYELJEN ARRRA, HOGY:

- 1/ Ne fújja a port közvetlenül a száj légszövetekre vagy a subgingivális területekre!
- 2/ Mindig tiszta és száraz levegőt használjon! A nedves levegőtől becsomósodhat a por és eltömítheti a porcsövet.
- 3/ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a szájon kívül a polírpor más nyálkahártyára (szem, orr)
- 4/ Csak a készülékhez biztosított saját port használja. A más gyártók által készített polírporok okozta károsodásokért és károkért nem vállalunk felelősséget.
- 5/ Töltse **félíg** a portartályt a polírozáshoz. Ha megmaradna, NE használja fel másik páciensnél, hanem hulladékként kezelje.
- 6/ A sokáig felbontottan tárolt port ne használja, mert a nedvességfelvétel miatt dugulást okozhat a készülékben.
- 7/ Amikor a készüléket leveszi a tömlőről, mindig fújja ki a készülék csatlakozójából a vizet. Ennek elmulasztása dugulást okozhat, ha a víz a levegővezetékbe kerül és elegyedik a polírral.
- 8/ A készülék tárolásához távolítsa el a port a készülékből és tisztítsa meg a portartály belsejét.
- 9/ Távolítsa el a zsíradékokat, olajat és más káros kémiai anyagokat a műanyag portartály tetőről mihelyt azokat felfedezte. Az ilyen anyagok a tető idő előtti károsodását okozhatják.

Biztonsági előírások a használat előtt

Ez a készülék polírpor kifúvására készült. A nedves levegő vagy víz eltömíti. NE használja olyan kezelőegységnél, amelyben eltömődés esetén a nyomás gyorsan megnőhet. (nincs a készülékben alkalmas nyomásszabályozó)

Miképpen tudja ellenőrizni a nyomást a kezelőegységen?


- 1/ Ellenőrizze, hogy a készülék végét befogva tartva a nyomás nem nő-e gyorsan és nagy mértékben?
- 2/ Amennyiben a nyomás gyorsan és nagy mértékben emelkedik ellenőrizze a nyomásszabályozót az egységkészülék előtt.
- 3/ Amennyiben nem talál nyomásszabályozót az egységkészülékben, telepíttessen diafragmás szelepű nyomásszabályozót.

ÜZEMELTETÉS


- 1/ Csatlakoztassa a készüléket a tömlőhöz (4 lyukú és 2 lyukú kivitel rendelhet)
- 2/ Csatlakoztassa a fúvókafejet a készülékhez



Csatlakoztatás a tömlőhöz.

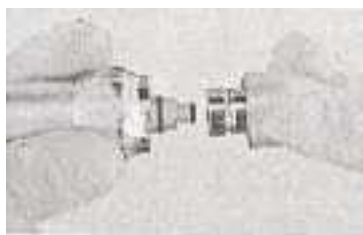

A kézidarab fényes színű csúszó gyűrűjét húzza hátra, majd tartsa így. Helyezze be a fúvókafejet és nyomja ütközésig. Ekkor engedje vissza a gyűrűt.

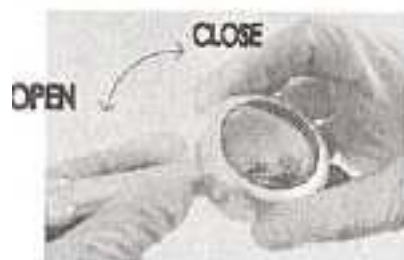

Open (nyitás) az óra járásával ellenkező irányban.
Close (zárás) az óra járásával egyező irányban.

3/ A polírpor feltöltése

Csavarja le a portartály fedelét. Töltse **félíg** a tartályt, majd rögtön zárja vissza a fedelet és a por üvegét is.

4/ Homokfúvás

Fújjon 3 mp-ig a köpőtálba, hogy meggyőződjön: a porsugár egyenletesen jön, ezután kezdje meg a használatot.

FIGYELEM!

SOHA ne használja fel a készülékben megmaradt port a következő beteghez, mert dugulást okozhat.

SOHA ne használja fel azt a port, amely ugyanabban az üvegben van, de napokig véletlenül nyitva maradt és nedvességgel telítődhetett. Mindkét esetben a készülék eldugulhat!

FIGYELEM!

SOHA ne fújja a polírport dirket módon a szájüregi lágszövetekre, ínyre vagy a subgingivális területekre. Mindig használjon exhaustort, hogy a beteg ne nyelje le a polírport. Megfelelő időközönként engedje, hogy betege öblíthessen.

HASZNÁLAT UTÁNI KARBANTARTÁS

- 1/ Teljesen ürítse ki a portartályt
- 2/ Húzza hátra a fúvóka rögzítő gyűrűt és távolítsa el a fúvókát
- 3/ Alkoholos törölkendővel távolítsa el a fúvókára rakódott szennyeződést és nyálat
- 4/ Vegye le a készüléket a tömlőről
- 5/ Távolítsa el a portartály fedőt, majd szedje szét:
 - a fogazott szélű fedélrögzítő gyűrűt, a tömítő gumigyűrűt
 - és a portartály műanyag fedelét tisztítsa meg.
- 6/ Tisztítsa meg a készülék portartályát
- 7/ Ha a készülék teljesen eldugulna, merítse a készülék testét és a fúvókát forrásban lévő vízbe 10 percre.
- 8/ Szárítsa meg az alkatrészeket a következő használatra.

Ha a készülék teljesen eldugul és nem működik, 20%-os ecetes öblítést alkalmazzon a fúvókafejben (fecskendővel, fém csőrvéggel), valamint a készülékben is. Ha szükséges, áztassa ecetes oldatban a fúvókafejet.

STERILIZÁLÁS

A gyártó autoklávozást javasol!

- 1/ Szedje szét a készüléket a következő komponensekre:
 - készülék és fúvóka
 - készülék és portartály fedő
 - a portartályt 3 részre: fogazott gyűrű, tömítőgumi és műanyag fedél
- 2/ Autoklávozza 20 percig 121 celsius fokon, vagy 15 percig 132 celsius fokon
- 3/ Használat előtt vegye ki a steril tasakból a készüléket. Helyezze be a fúvókát, majd állítsa össze a portartály fedőt és végül töltsön port a tartályba, majd csavarja rá a készülékre a fedőt.

FIGYELEM!



Azonnal állítsa le a sterilizálást, ha a szárítás közben a hőmérséklet 135 celsius fok fölé emelkedne!

A sterilizálásnál a készüléket a középső vagy a felső tálcára tegye, mert az alsón a hőmérséklet a beállított érték fölé is emelkedhet.

Ne sterilizálja olyan eszközökkel, amelyeken kémiai anyagmaradványok vannak, mert ezek elszínezhetik vagy működési gondot okozhatnak a készüléken.

HIBAEELHÁRÍTÁS

| Jelenség | Valószínű ok | Elhárítás |
|---|--|--|
| A fúvókából nem jön por | A fúvóka eltömődött | Távolítsuk el a fúvókát, amikor a tartályban nincs por. A mellékelt eszközzel tisztítsuk ki a fúvókát, majd fújjuk át puszterrel. |
| | A tartályból nem jön át a por | A fúvóka csatlakozónál ütközésig vezessük be a készülékbe a hosszú tisztító pálcát. Ha ez nem vezet eredményre, 10 percig helyezük forrásban lévő vízbe a készüléket, majd szárítsuk ki. |
| Levegő és por is jön, de nem elég erővel | Túl régi port használunk. | Cseréljünk port a készülékben. |
| | Víz került a levegőrendszerbe | A csatlakozónál cseréljünk tömítést. Ellenőrizzük, hogy a gép levegője nem vizes-e. Kondenzvíz és filter ellenőrzése. |
| | A készülék légvezetékét a víz hatására megszilárduló por eltömítette | Távolítsa el a fúvókát. Tisztítsa meg a fúvókát és a portartályt a mellékelt tisztító pálcákkal. |
| Víz szivárog a belső portartály fúvókánál | A csatlakozó tömítése rossz | Cserélje ki a csatlakozó tömítést. |
| A fúvóka alig forog | A polírpor felrakódott a fúvóka "o"gyűrű bemélyedésében. | Távolítsa el a fúvóka "o"gyűrűt és tisztítsa ki a helyét, majd rakja össze. |

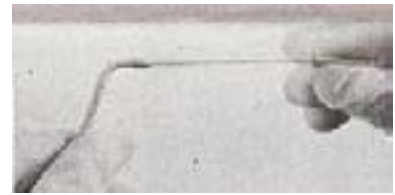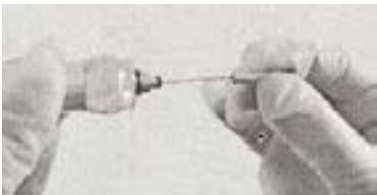

Gyártó:

TPC Advanced
 851 S. Lawson St City of Industry, CA 91748
 Phone: (626) 810-4337 • Fax: (626) 810-4245
 customerservice@tpcdental.com • www.tpcdental.com

Forgalmazó:

Dr. Volom Dental & Medical Kft.
 H-1055 Budapest, Nyugati tér 9. I/3.
 tel.: +36 1 311 65 84 • fax.: +36 1 489 37 09
 mail: shop@drvolomdental.hu • web: www.drvolomdental.hu