

## Silensor orvosi használati utasítás - verziószám: 1.0



A Silensor elkészítésének első lépése a páciens ismertető kitöltése. Ennek segítségével fogja a technikus beállítani a Silensor készülék összekötő elemének hosszát.

**Fontos megjegyezni: éjszakai fogszorítóknál a Silensor ellenjavallt!**



Ha nem tudja megállapítani biztonsággal, hogy betege szorít-e töltse le a [www.drvolomdental.hu](http://www.drvolomdental.hu) honlap NTI-tss-el kapcsolatos oldaláról a részletes kérdőívet a fogszorítás felderítésére vagy adjon páciensének BiteStrip-et, amellyel megmérheti a fogszorítás mértékét is.



Javasoljuk, hogy mindig végezzen mérést a SleepStrip-el, hogy a horkoláshoz esetenként társult éjszakai légzéskimaradást (sleep apnea) felmérhesse. A Silensor hatásosságát ugyancsak mérje le egy SleepStripp-el, mivel a nem megfelelően kezelt sleep apnea egészségkárosodást okoz. Súlyos esetek kezelésére (a SleepStrip által mutatott érték“3“) kötelező a beteget alváslaboratóriumba utalni. Ehhez kérje a házi orvos segítségét.



Kötelező a **Silensor használati utasítás és beleegyező nyilatkozat** két példányos kitöltetése. Az egyik az orvosé, a másik a betegé lesz.

A dokumentum rögzíti betege kötelességeit is, ezáltal védelmet jelent az orvosnak is.



Készítsen egy alsó-felső szilikon lenyomatot és vegyen harapást.

A harapás levétele alatt betege álljon, vagy egyenes derékkal üljön.

A lenyomatot, a harapást és a kitöltött páciens szórólapot küldje el fogtechnikusának.



Amikor átadja a készüléket ellenőrizze az okklúzió egyenletességét, melyet már fogtechnikusa becsiszolt. Ha kell igazítsa be a síneket.

**FONTOS!** Ellenőrizze a konnektorok megbízható rögzítettségét azok szét húzásával. A konnektoroknak stabilan ellen kell állniuk!

Fogtechnikusa elküldés előtt már ellenőrizte a konnektorok megfelelő rögzülését. Abban a kevéssé valószínű esetben ha szét tudja húzni azokat **TILOS** a készüléket átadni.

Küldje vissza a laboratóriumba a Silensort konnektor cserére.

**VISSZARENDELÉS** Ne feledje betegét visszarendelni. A **Silensor használati utasítás és beleegyező nyilatkozat** erre nézve pontos tájékoztatást ad.

**ELLENJAVALLAT**

-Állcsontonként kevesebb mint 8 fog

-Súlyos alvási apnoe esetén a kivehető készülékek nem elégségesek.

-Túlsúlyos betegeinél az alvási apnoét nem fogják a kivehető készülékek hatásosan csökkenteni.

Amennyiben betege testtömeg indexe (BMI) nagyobb mint 30 előbb fogyni kell. A [www.drvolomdental.hu](http://www.drvolomdental.hu) honlap Silensorról szóló oldalán talál BMI kalkulátort.

**HORDÁS KÖZBEN:**

-A beteg feszülést érez, ha felhelyezi a Silensort. **Válasz:** Ez természetes. A feszülés hamar oldódik.

-Betegem azt érzi, hogy reggel fogai másképp érintkeznek. **Válasz:** Ez a jelenség az izmok átprogramozásnak vagy az ízületben megjelenő synoviális folyadéknak tudható be. Hamar elmúlik.

-Egy hónap elteltével a készülék nem oly hatásos. **Válasz:** A hatásosság csökkenésekor 1-2 nap szünetet kell tartani. Ezt követően a készülék ismét jól működik.

-A készülék túl kényelmetlen, előre kényszeríti a fogaimat. **Válasz:** A konnektor elemet 1mm-el hosszabbra kell cserélni

-A készülék nem csökkenti eléggé a horkolást. **Válasz:** A konnektort 1 mm-el rövidebbre kell venni.